


STÜTZ-KORSETT AUS STOFF NACH MASS

Merkblatt

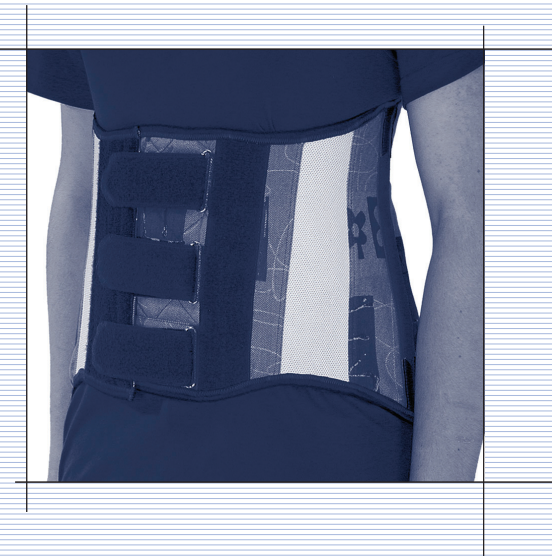

Hauptgeschäft **Weitere Standorte**

Effingerstrasse 37 CH-3008 Bern Fon 031 388 89 89 Fax 031 382 34 81	Bälliz 55 CH-3600 Thun Fon 033 222 30 55 Fax 033 222 30 26	Hammerstrasse 12 CH-4058 Basel Fon 061 691 62 70 Fax 061 693 15 52	Aaraustrasse 42 CH-5734 Reinach AG Fon 062 772 36 60 Fax 062 772 36 61	Forchstrasse 313 CH-8008 Zürich Fon 044 422 46 22 Fax 044 422 46 30	Oberer Graben 28 CH-8400 Winterthur Fon 052 209 01 90 Fax 052 209 01 91
--	---	---	---	--	--

www.ortho-team.ch
info@ortho-team.ch

STÜTZ-KORSETT AUS STOFF NACH MASS (Lendenmieder)

Sie leiden unter Rückenschmerzen.
Ihre Wirbelsäule verlangt eine Ruhigstellung.

Der Arzt / die Ärztin hat uns mit der medizinischen Verordnung beauftragt, Ihnen ein Stütz-Korsett nach Mass herzustellen.

Tragen Sie das Stütz-Korsett

- bei Haushaltsarbeiten
- bei beruflichen Arbeiten (schwere Lasten tragen)
- bei langem Sitzen oder Gehen

Durch tägliches Tragen wird die Wirbelsäule entlastet.
Eine seitliche Stand-Drehung (Rotation der Wirbelsäule) ist strikt zu vermeiden.

Pflegehinweise

- Handwarm mit Feinwaschmittel waschen und glatt legen zum Trocknen.
- chemische Trocken-Reinigung

Eine jährliche Kontrolle ist empfehlenswert und somit eine gute Passgarantie gewährleistet.
Bei Gewichts- Zu oder Abnahme ist eine sofortige Kontrolle nötig.